





# Technisches Datenblatt

<p><b>Artikel:</b> 4602 </p> <p><b>Modell:</b> Einweg-PP-Maske</p> <p><b>Farbe:</b> blau</p> <p><b>Material:</b> Polypropylen (PP)</p> <p><b>Verpackung:</b> 50 Boxen / Karton</p> <p><b>Unterverpackung:</b> 50 Stück / Box</p> <p><small>Details zur Verpackung siehe unten (Tabelle).</small></p>	 <p><small>© BIG Arbeitsschutz GmbH</small></p>
---	--

**Ausstattung:**

Polypropylen (PP), 3-lagig, mit elastischer Befähigung  
Verpackt in Spenderboxen (mit 50 Stück Inhalt), 50 Boxen in einer VE

**Eigenschaften:**

3-lagige, nicht zertifizierte Einwegmaske für eine universelle Einsetzbarkeit. Die elastische Befähigung sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

**Einsatzbereiche:**

Bei diesem Einweg-Masken handelt es sich nicht um PSA. Sie bieten daher keinen zertifizierten Schutz, um den Träger bei gefährlichen Arbeitsprozessen vor feinen Partikeln, Gasen, Dämpfe u.ä. zu schützen.  
Geeignet nur für Tätigkeiten, bei denen eine einfachste Filterung von groben Partikeln ausreicht.

**Markierungen auf der kleinsten Verpackungseinheit:**

Handelsmarke, Modell-Nr., Modell-Bezeichnung

	Markenlabel des Herstellers
4602	Artikel-Nr. des Herstellers
Einweg-PP-Maske	Artikel-Bezeichnung des Herstellers

**Maße/Gewichte Einzelartikel:**

Größe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in g
Einheitsgröße	17,5	9,5	0,1	3

Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

**Verpackungsdetails (VE):**

Größe	kg brutto	kg netto	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm
Einheitsgröße	7,5	6	52	39	31




Die oben genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

**Gefährliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):**

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt und enthält keine Gefahrstoffe in deklarerungspflichtigen Konzentrationen.

**Aufsetzanleitung:**



	1. Öffne die Box und halte die Maske in den Händen.
	2. Platziere die Elastikbänder hinter den Ohren und ziehe die Maske über Nasenrücken und Kinn.
	3. Die Maske durch den Nasenbügel in Form bringen.

**Tragevorschriften:**

Das Produkt erfüllen seinen Zweck nur, wenn es völlig korrekt und in bestem Zustand getragen wird. Überprüfen Sie es vor Verwendung auf Mängel oder Fehler. Treten während der Verwendung Risse oder Löcher auf, muss es sofort entsorgt werden. Veränderungen am Produkt ist nicht erlaubt. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden und/oder Folgen, die aus unsachgemäßer Nutzung entstanden sind.

**Pflegeanleitung:**



Die Masken nicht waschen, nicht bleichen und nicht im Tumbler trocknen. Nicht bügeln. Eine professionelle Trocken- sowie Nassreinigung ist nicht möglich.

**Bei dem Produkt handelt es sich um einen Einwegartikel für den einmaligen Gebrauch.**

**Lagerung und Alterung:**

Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, ändern sich bis zu 3 Jahren ab Herstellungsdatum gerechnet die Eigenschaften nicht. Die Lebensdauer kann nicht genau angegeben werden und hängt von der Anwendung und davon ab, ob der Benutzer sicherstellt, dass das Produkt sachgemäß gelagert und nur für den Zweck eingesetzt wird, für den es auch bestimmt ist.

**Entsorgung:**

Die benutzten Masken können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

**Gesundheitsrisiken:**

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Masken, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

**Erste Hilfe:**

Wenn das Produkt mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist, entfernen sie es.  
Bei Hautkontakt: Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, falls eine allergische Reaktion auftritt.  
Bei Augenkontakt: Waschen Sie das betroffene Auge mit Wasser aus. Ziehen Sie unverzüglich einen Arzt zu Rate.

**Die Herstellerinformation erhalten Sie unter:  
[www.big-arbeitsschutz.de](http://www.big-arbeitsschutz.de)**



Stand vom 26.04.2018